

Індивідуальні налаштування параметрів артикулятора

Кут нахилу сагітального суглобового шляху

Відкриваємо усі замки артикулятора, щоб мати вільний доступ для налаштування параметрів. Для встановлення кута сагітального суглобового шляху нам потрібен протрузійний регістрат.


- Відкриваємо замок суглобового механізму.
- На модель нижньої щелепи накладаємо регістрат.
- Прикладаємо до регістрату верхню модель дивлячись за тим, щоб голівка артикулятора не випала.

Див. наступні 2 картинки




Щоб встановити кут, повертаємо цілою коробкою і знаходимо момент, в якому голівка торкається до білої прокладки. Закручуємо гвинт, що затискує коробку.

Після установки лівої сторони ту ж дію виконуємо для правої сторони (Див. наступні 3 картинки).

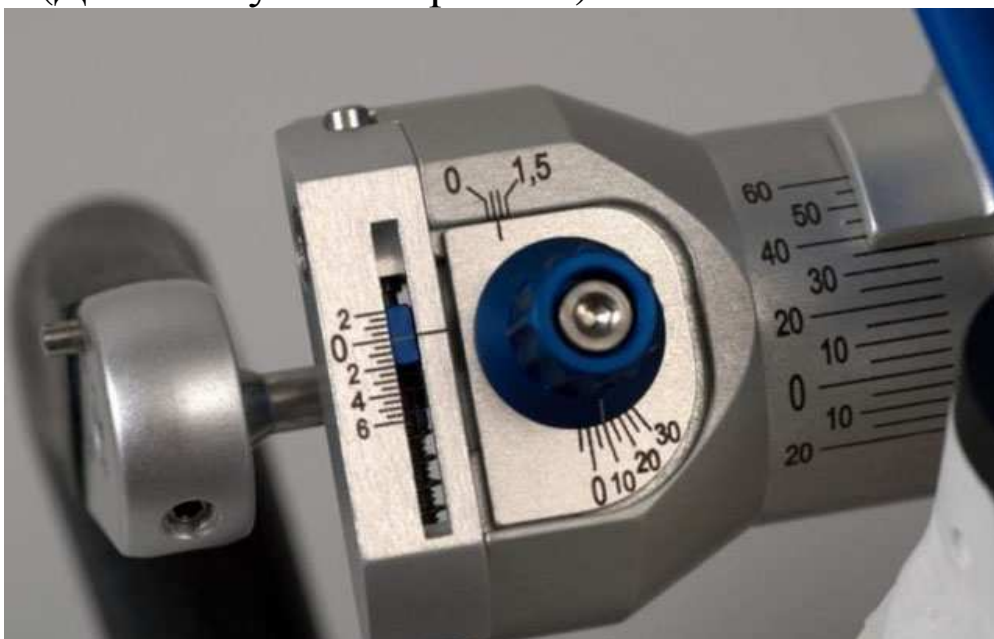

Коли гвинти затиснуті з обох боків, ми знімаємо показники кута сагітального суглобового шляху нашого пацієнта. Бачимо що вони різні з правого і лівого боку. І відрізняються від середньоанатомічної норми в 35°
Правий бік 37° .

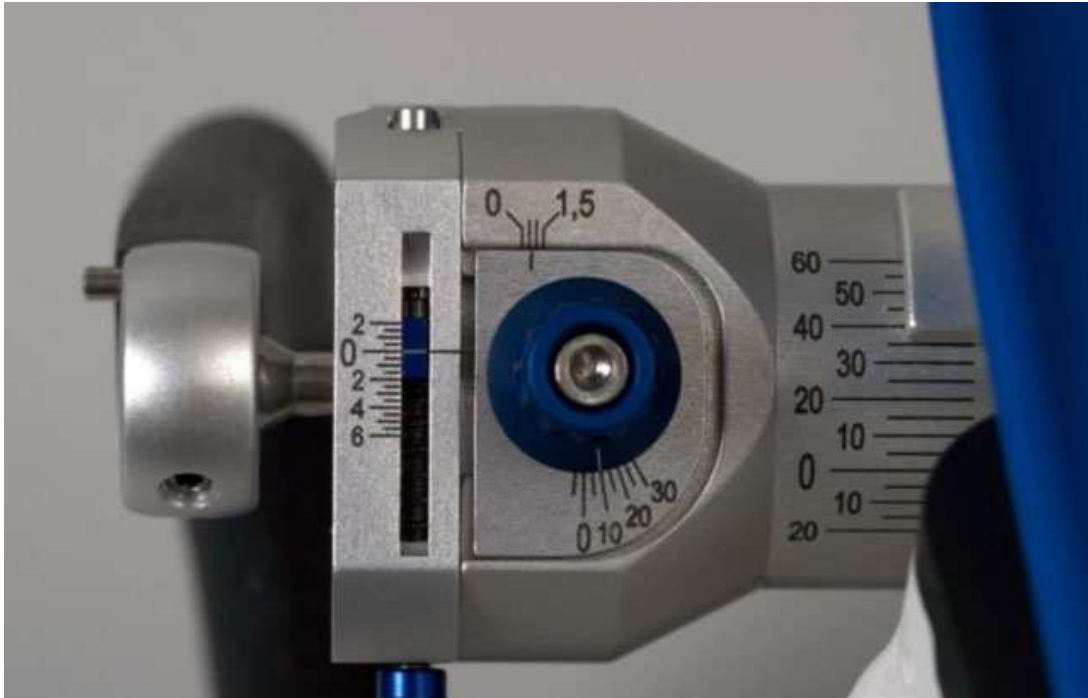


Лівий бік 36° .



Кут Бенетта

- Відкриваємо замок суглобового механізму.
- Відкручуємо верхні гвинти.
- На модель нижньої щелепи накладаємо реєстрат.
- Прикладаємо до реєстрату верхню модель дивлячись за тим щоб головка артикулятора не випала. (див. наступні 4 картинки)

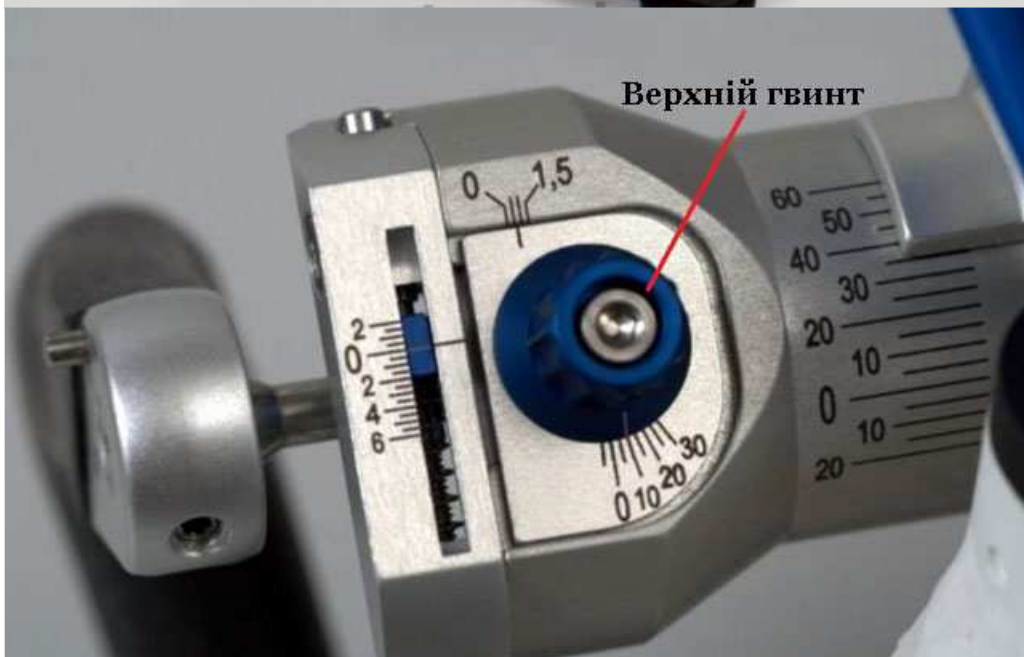

Щоб встановити кут Бенетта нам потрібен латеротрузійний реєстрат.



Зуби змикаються лише на іклах.



Якщо ми зімкнули верхнє і нижнє ікла з лівого боку то встановлювати будемо правий кут Бенетта. Регулятор верхнього гвинта закручуємо до легкого упору і фіксуємо гвинт викруткою (див. наступні 3 картинки).





Ті ж дії повторюємо для правого боку.

Коли гвинти затиснуті з обох боків, ми знімаємо показання кута Бенетта. Показання правого та лівого боків майже однакові і дорівнюють 14° і 15° . Вони так само відрізняються від середньої прийнятої норми 10° . Усі індивідуальні параметри пацієнта ми перенесли в артикулятор. Можемо тепер приступити до подальшої роботи.